

Qi3539 型痰细胞分类计数器 使用说明

一、 操作说明:

1、 开机显示:

Qi3539 CELL COUNTER

清零	1 纤毛上皮	2 巨噬	3 中性	4 嗜酸	5 红细胞	6 其它③	减 1
总数 设置	7 圆形上皮	8 淋巴	9 单核	10 嗜碱	11 其它①	12 其它②	% 百分比

注意:

I、 开机总数自动设定为 500，可按总数设置键改变总数。方法为：
第一次按总数设置键，显示当前所设的总数，再按该键则加 100，依次到达最大 1000，再按则回到 100，循环为 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500。当显示的总数您认为合适时，即可按细胞键进入数。

II、 键盘上每一个细胞上方都有对应的一个数字，是为方便显示设计的，如数字 8 就表示对应的细胞为淋巴。

III、 其它①键，其它②，其它③能定义未给出的任意细胞。

IV、 英文缩写意义:

NUM-----细胞对应代号 QTY-----细胞个数 TOTAL----总数
%-----百分比 PC (%) ----- 百分比

2、 按细胞键则进入计数，显示如下:

NUM	QTY	TOTAL
1	1	1

当总数每次到达整百时，鸣响 3 声提示，当计数到达设定的总数时，鸣响 5 声提示。再按细胞键，显示：

COUNT	TOTAL= xxxx
SET	TOTAL= xxxx

按动%键，可查看所计细胞的个数和百分比。显示格式为：

NUM	QTY	PC(%)
6	20	4.00%

- 6、按任何键均鸣响一声，提示按键有效；当按错细胞键时，可按**减 1 键**减去。
- 7、虽然设置了总数，但**允许未计到设定的总数时按动%键**，按动%键后，不能再继续计数。
- 8、结束分类计数，要读取分类结果时可按动%键，则从 1 号键开始显示分类结果，未计数的细胞显示为**0**。
- 9、要进行下一例分类计数，必须按**清零键**，以清除上例结果，但上次设置的总数不变。
- 10、如果显示屏显示的字母变暗，则表示供电电压太低，请注意更换**电池**。

二、使用注意事项：

- 1、该机为交直流两用供电方式，将外接稳压器输出插头插到计数器后插孔，电池供电断开，有外接稳压器供电；拔掉外接稳压器器输出

插头，则有电池供电。外接稳压器器输出插头请勿经常随意拔出，以免接触不良，常期不用电池供电，请将电池取出。使用完毕，将开关置 OFF 位置，拔掉外接稳压器 220V 输入插头。

- 2、禁止挤压、扭曲、碰撞和私自拆卸，如出现故障，请与本所联系，该机保修一年，终身维护，属使用不当而非产品质量问题造成器件损坏，维修时酌情收费。

三、额定环境工作条件：

- 1、 交流电源电压：220V \pm 10% 50HZ；
电池供电：4节5号（1.5V）电池，注意方向请勿放置反。
- 2、使用环境：
温度：0~40℃；相对湿度： \leq 80%；
大气压力：750MM汞高

北京凯弘电子仪器有限公司
（北京千山仪器设备研究所）
地址：北京市东城区后永康胡同17号南楼503
邮政编码：100007
电话：(010)84036081 传真：(010)84036082